

다시 도약하는 대한민국, 함께 잘 사는 국민의 나라



식품의약품안전처

## 식품의약품안전처

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 안전성 정보 알림[개인용인공호흡기]

1. 귀 단체(기관)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 최근 우리 처에 보고된 '개인용인공호흡기'의 안전성 정보와 관련하여 안전 사용 강화를 위해 의료기관 및 의료진에게 아래 사항을 준수할 것을 권고하오니, 귀 단체(기관)의 회원에게 널리 알려 주시기 바랍니다.

### <의료인 권고사항>

개인용인공호흡기 사용 시 환자의 안전을 위하여 다음의 사항을 주의하시기 바랍니다.

- 개인용인공호흡기의 느슨한 알람 설정으로 환자 상태의 변화가 있어도 알람이 발생하지 않은 사례가 있어 적정한 범위의 알람 설정을 위한 압력, 호흡량, 호흡수 등은 담당 의사가 환자의 상태를 확인한 후 직접 설정하시기 바랍니다.
- 가정에서 개인용인공호흡기 사용 시 산소포화도 모니터를 함께 사용할 것을 환자 및 보호자에게 권장하고, 산소포화도 모니터 사용 방법과 응급 상황시 대처 요령 및 비상 연락처를 알려주시기 바랍니다.
- 아울러, 개인용인공호흡기 사용 중에는 모든 연결이 바르게 되었고 새는 곳(호스 연결 부위 등)이 없는지를 반드시 주기적으로 확인하도록 환자 및 보호자에게 안내하시기 바랍니다.

끝.



EaseUS PDF Editor

## 식품의약품안전처장



수신자 한국의료기기안전정보원장, 의료기관평가인증원장, 사단법인 대한병원협회, 대한중소병원협회, 대한의사협회, 대한개원의협의회, 사단법인 대한간호협회장, 대한결핵및호흡기학회, 대한내과학회, 의료기기 안전정보 모니터링센터장(17개기관)

의료기술주사	의료기술사무	의료기기안전 전결 2024. 7. 30.
보	임지영	관
	김국한	평가과장
		가정훈

협조자

시행 의료기기안전평가과-4055 (2024. 7. 30.) 접수

우 28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 / [www.mfds.go.kr](http://www.mfds.go.kr)

전화번호 043-719-5007 팩스번호 043-719-5000 / [jiyeongim@korea.kr](mailto:jiyeongim@korea.kr) / 비공개(5)

힘내라 대한민국!